

はじまります
水素水生活

いつでも新鮮、
“作りたて”の
水素水をどうぞ



TRIM ION SMART
本体価格¥198,000+税
共同購入特別価格
¥98,000+税
50%OFF




TRIM ION GRACIA
本体価格¥378,000+税
共同購入特別価格
¥189,000+税
50%OFF

1 水素が豊富な
アルカリ性の水です

抗酸化性のある
水素が
たっぷり



アルカリ性の
おいしい水

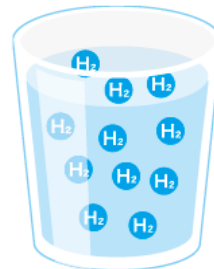


2 胃腸症状を
改善します

胃もたれや胃の不快感を
やわらげます。

胃腸の働きを助け、
お通じを良好にします。

3 不純物を除去した
安全な水です

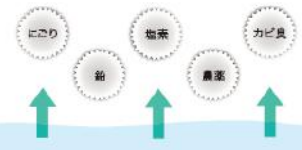

水素水活用法

水素水はここが違う! 使って実感してください

1 ごはんがふっくら
おいしく炊けます



水素水で
研いでから
炊き上げると



ふっくら
ツヤツヤ



2 新鮮野菜を
よりおいしく!



水素水で洗うと
汚れがさっと浮き出て、
おいしさアップ

3 お茶もより濃く、
風味が増します

いつものお茶も
水素水なら
すぐに濃くなる



別紙お申込み用紙より注文下さい

申込書



品目	発注数	特別価格(税別/送料込)	
電解水素水整水器(卓上型) スマート	台	¥98,000+税	50%OFF(定価198,000円)
取り付け工事希望	有・無		取付費用についてお見積させていただきます。
◆混合水栓一体型(定価378,000円⇒特価189,000円)についても特別価格にてご提供できます。			

お名前			
ご住所	TEL:	FAX:	
希望納品日	平成 年 月 日	コメント欄	
	<input type="checkbox"/> 午前中 <input type="checkbox"/> 12-14 <input type="checkbox"/> 14-16 <input type="checkbox"/> 16-18 <input type="checkbox"/> 18-20 <input type="checkbox"/> 20-21		

■納品先情報(上記と納品先が違う場合)

納品先建物	〒 -		
ご住所	お名前:	TEL:	

■スマートの取り付けはご自身で出来ます。但し、取付をご希望の方は標準取付工事¥10,000(税別)となります。

また、特殊蛇口の場合は別途、取付工事が必要となります。取付工事が必要な場合はご希望の欄にレ点をご記入下さい。

ご自宅の蛇口を CHECK!

下記タイプをお使いの場合は別途工事が必要です。

先端が 10mm 以下 	シャワー ノズル付 
先端が 特殊な 形 角形 楕円形 	センサー 付 

※この他にも変形水栓やねじ径(22mm以外)や
パイプ径の違うものがありますのでご注意ください。

- 立上工事 分岐工事 混合水栓一体型取付



¥25,000(税別)
~



¥25,000(税別)



¥30,000(税別)~
電気工事要¥40,000(税別)~

取付工事をご希望の方は、メンテナンス事業部まで

<納品について>

ご注文日から4日~1週間以内の納品希望日設定可能です。(送料無料)

- ・数か所に分けて納品可能。納品日を分けることも可能。納品希望日・納品先は、お申し込み時に御申し出ください。
- ・納品時間のご希望の場合は口の欄にレ点をご記入ください。

<お支払いについて>

- 銀行振込
- コンビニ払い
- クレジットカード払い
- ショッピングローン

※お支払については各種ございますのでご相談ください。

<キャンセルについて>

- ・キャンセルはお受付致しかねますので、ご了承ください。
- ・納品日等を変更する場合は下記宛にご連絡ください。

お問い合わせ先

株式会社ロイヤルエンタープライズ

TEL 0120-0083-25

担当:大沼・大柿

商品申込FAXはコチラ

FAX 03-3463-7757

24時間
FAX受付

連続生成型電解水素水整水器

TRIM ION Smart



電解水素水整水器 TRIM ION Smart

本体標準価格 ¥198,000(消費税別・取付工事費別)
管理医療機器製造販売認証番号：225AGBZX00033000

おいしい^{PLUS}胃腸にいい水 日本トリムの電解水素水

飲料水として、ミネラルウォーターを買う、おいしく安全なものを選ぶ、
という習慣はすっかり定着しました。
そして時代は、おいしいだけの水からカラダによい水へ。
ストレスや環境汚染にさらされる現代人の健康づくりを、
日本トリムは「電解水素水」でお手伝いしています。

効能 または 効果

胃腸症状の改善

- 胃もたれや胃の不快感をやわらげます。
- 胃腸の働きを助け、お通じを良好にします。

「電解水素水整水器」と「浄水器」の違いとは？

電解水素水 整水器

浄水をさらに電気分解する事で、
胃腸症状の改善の効能・効果が認められた
電解水素水を生成する医療機器です。

浄水器

フィルターで塩素、トリハロメタン、鉛などを
取り除き、安全でおいしい水にします。

株式会社日本トリムは、1982年創業以来水の研究を続けており、これまで約90万世帯で製品をご利用いただいております。

スマートに暮らそう。



水素を多く含む水、電解水素水

- 1 ダブル・オートチェンジ クロスライン方式**
 電解層内の電極は電気分解によるメッキの作用で、使用しているうちに水中のミネラルが結晶化し、スケールとして電極に付着し、電解能力を低下させます。トリムイオンは独自の自動極性・水路反転洗浄装置を採用し、電極にスケールが付着する事を防いでいます。
- 2 スwitチング・レギュレーター 制御方式**
 いつも安定した濃度の水素水を生成するために、地域や季節によって変化する水質に応じて自動的に電気分解を制御する日本トリム独自の技術を採用しています。さらに、この制御方式は電源変換効率がよく、電気を有効に使うことのできるエコ技術でもあります。
- 3 タッチスイッチ 簡単操作**
 操作ボタンが両面にあり、タッチパネルでスマートな操作性。
- 4 JIS規格指定5物質^{*1} 7トン除去 マイクロカーボンカートリッジ**
 マイクロカーボンカートリッジは、溶解物質の吸着が速く、濁りなどの微粒子までしっかり取り除きます。新成型法により、マイクロカーボンだけでJIS規格指定5物質の除去が可能になりました。また、環境にやさしいエコ素材[ヤシ殻]を使用しています。



TOUCH

^{*1} 5物質とは：①遊離残留塩素(カルキ)、②2-MIB(カビ臭)、③溶解性鉛、④CAT(農薬)、⑤テトラクロロエチレン

水素水

胃腸に負担をかけないから 毎日の飲み水や水出し茶に
 胃もたれや胃の不快感をやわらげます。また、胃腸の働きを助け、お通じを良好にします。水のままでお茶がよく出るので、水だし茶にもお使いいただけます。



ふっくらおいしく… 毎日のご飯の炊き水に
 電解水素水でご飯を炊くと、炊き上がりがふっくらで、おいしくなります。



くつろぎタイムの 緑茶・紅茶・コーヒーに
 おいしい水は緑茶・紅茶・コーヒーの味を引き立てます。



煮物やアク抜きに… 調理用としてお使いください
 ダシがよく取れ、煮物の素材をふっくらとやわらかく仕上げます。また、調理素材のアク抜きにもお使いいただけます。



電解水素水レベル別用途

電解水素水の用途例 (あくまでも目安)		
	レベル1 飲用	電解水素水を初めて飲むとき
	レベル2 飲用	通常飲用、お米を炊くとき
	レベル3 飲用	通常飲用、コーヒー、紅茶、緑茶、鍋物、汁物などに
	レベル4 調理	煮物、アク抜きなどに

主な仕様

- 管理医療機器製造認証番号:225AGBZX00033000
- 定格電流: AC100V ●定格周波数: 50/60Hz ●定格電流: 4.5A
- 電解電圧: 50V(Max)
- 定格生成量: 水素水4ℓ/分、酸性水4ℓ/分、浄水5ℓ/分
- 入水圧力: 0.05~0.7MPa ●本体重量: 約3kg
- 本体寸法: 323(W)×293(H)×63(D) ●電源コード長: 約2.7m
- 電解層: 4層8セル ●電極寿命時間: 1400時間
- 消費電力: 約260W(待機時間約0.8W)
- 浄水カートリッジ寿命: JIS規格5物質約7トン
- 本体保護機能: 分岐水検定流量弁、分岐水検警告弁(過大水压防止)、定電流制御回路、過熱防止装置

交換用浄水カートリッジ(別売)

標準価格(税別) ¥7,500

浄水

ミルクや薬の服用に
 塩素系の不純物が含まれていない安全な水です。赤ちゃんのミルクや薬の服用にお使いください。



酸性水

洗顔や洗い物に
 電解酸性水は電解層の陽極側で生成される酸性の水です。洗顔や洗い物にお使いいただけます。



お求め、お問い合わせは

(社)日本経済団体連合会会員 (財)機能水研究振興財団理事
 (社)日本病院会会員 (社)日本ホームヘルス機器協会正会員

株式会社日本トリム 東証一部(証券コード:6788)

本社 / 〒530-0001 大阪市北区梅田2-2-22 ハービスENT オフィスタワー 22F
 TEL.06-6456-4600(代)

支社 / 札幌・仙台・東京・名古屋・広島・福岡
 その他事業所につきましては、当社ホームページをご覧ください。

☎ 0120-328-106 <http://www.nihon-trim.co.jp/>

■製造販売元
 株式会社 トリムエレクトリックマシナリー
 〒783-0060 高知県南国市蛸が丘1-5-2

